

TAMIZAJE DE ANEUPLOIDIAS

Requisitos	Tomar 4 cc de sangre periférica en un tubo sin aditivos (tapa roja o amarilla). Dejar reposar 15 minutos máximo y centrifugar a temperatura ambiente a 3500 r.p.m. por 15 minutos. Extraer el suero a un recipiente estéril y congelar.	
Estabilidad de la muestra	6 días refrigerada 30 días congelada a -20°C Ilimitado congelado a -80°C	
Días de procesamiento	Martes y Jueves	
Entrega de resultados	Miércoles y Viernes	
Técnica empleada	Inmunoquimioluminiscencia. Equipo: Delfia Xpress de Perkin Elmer	
Control de calidad	Interno: bajo, medio y alto	
Control externo de calidad	Riqas, California	
Códigos primer trimestre	PAPP-A	008001
	B-hCG fracción libre	906626
	Ecografía	005001
	Cálculo estadístico	008002
Códigos Segundo trimestre	B-hCG	003047
	Estriol	904505
	Alfa feto proteína	906602
	Calculo estadístico	008002
Formularios	Ingreso de tamizaje de aneuploidías Consentimiento informado	
Observaciones	Entre las 9 y 13,6 semanas de gestación. Debe ir acompañado de ecografía con medición de CRL y Sonolucencia nucal. (CRL entre 45 y 79mm) Resultado interpretado por médico tratante. La prueba no está validada para embarazos múltiples con más de dos fetos. Las muestras que no ingresen congeladas o refrigeradas no será procesadas.	