

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENVÍO DE MUESTRAS



Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos
Sangre periférica		Diario	Diario	Aneuploidías: 24 – 48 Horas Microdeleciones: 7 días Genes de fusión: 7 días	No requiere ayuno
Estabilidad	12-24 horas Temperatura ambiente				
Cantidad	5 cc				
Tubo	Heparina sódica (tapa verde)				
Observaciones					
Líquido amniótico					
Estabilidad	24 horas Temperatura ambiente				
Cantidad	15- 20 cc				
Tubo	Jeringa con aguja sellada y embolo asegurado				
Vellosidad Corial					
Estabilidad	12 – 24 horas Temperatura ambiente				
Cantidad	3-5 mg				
Tubo	Deben ir en medio de cultivo que provee Genetix.				
Sangre fetal					
Estabilidad	12 – 24 horas Temperatura ambiente				
Cantidad	1cc				
Tubo	Heparina sódica (tapa verde)				
Observaciones	Se debe contar con hematocrito fetal para confirmar el origen de la muestra.				
					Edad gestacional mayor a 15 semanas de gestación 12- 14 semanas de gestación.