

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



TAMIZAJE PRENATAL DE PRIMER TRIMESTRE (SEROLÓGICO)

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Suero materno		Diario	Martes y Jueves* *En semanas de Lunes festivo el montaje se realizará solo los Miércoles.	Miércoles y Viernes* *En semana de lunes festivo los resultados se emitirán los jueves.	Se realiza entre las 9 y 13,6 semanas de gestación (CRL 45-79mm). Para cálculo de riesgo se debe acompañar de ecografía obstétrica con medición de sonolucencia nugal. Se puede realizar en embarazos gemelares. *No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	Medición de analitos placen- tarios (PAPP-A y B-hCG) por quimioluminiscencia en Delfia Xpress. Sensibilidad: 90%
Estabilidad	6 días refrigerado a 8°C. 30 días o más congelado					
Cantidad	2 cc					
Tubo	Tubo tapa roja o amarilla sin anticoagulante					
Observaciones	Tomar 5 cc de sangre periférica en tubo tapa roja o amarilla sin anticoagulante, dejar reposar la sangre de 10 a 15 minutos a temperatura ambiente y centrifugar 3500 rpm por 15 minutos. Congele hasta realizar el envío.					