

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



¿DESEAS CONOCER EL SEXO DE TU BEBÉ?

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos
Sangre periférica en tubo BCT		Diario	Lunes* y Jueves <i>*Ensemanas de Lunes festivo, el montaje será el Martes</i>	Lunes* y jueves en la noche <i>*Ensemanas de Lunes festivo, el resultado será emitido el Martes</i> Disponible después de las 8:00 pm	Se realiza a partir de la semana 9 de gestación por ecografía. Sensibilidad: 98%. *No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado *Requiere traer ecografía para confirmar semanas de 9-10 No es recomendable realizar esta prueba en embarazos gemelares (bicorial biamniótico) ya que no es posible discriminar el sexo de ambos fetos.
Estabilidad	4 días a temperatura ambiente				
Cantidad	1 tubo BCT				
Tubo	Solicita el kit Genetix				
Observaciones	Las muestras se deben mezclar invirtiendo el tubo 10 veces suavemente para evitar hemólisis.				