

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



ANEUPLOIDÍAS EN TODOS LOS CROMOSOMAS

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Sangre periférica en tubo BCT		<u>Laboratorios fuera de Bogotá</u> tomar muestras Lunes y martes Hacer envío el mismo día para que la muestra llegue el día siguiente a la toma de muestra.	Diario	10 a 12 días Calendario	Se realiza a partir de la semana 10 de gestación. NO se realiza en embarazos gemelares. *No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	NGS Sensibilidad 99%
Estabilidad	4 días a temperatura ambiente					
Cantidad	1 Tubo BCT tiene capacidad de 10ml					
Tubo	Solicitar el kit Genetix					
Observaciones	Inmediatamente se toma la muestra, mezclar el tubo 10 veces por inversión suavemente, para evitar hemólisis.					
		<u>Laboratorios en Bogotá</u> tomar muestras Lunes, martes, miércoles y viernes Hacer envío el mismo día de la toma de muestra a Genetix.				