

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



ESTUDIO DE PREECLAMPSIA TEMPRANA

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Suero materno		Diario	Semanal	5 días	<p>Se realiza entre las 10 y 13,6 semanas de gestación (CRL 45 –79mm).</p> <p>Para cálculo de riesgo se debe acompañar de ecografía obstétrica con Doppler de arterias uterinas reportando IP de arteria uterina derecha e izquierda.</p> <p>*Realizar toma de tensión arterial y registrar en formulario de ingreso.</p> <p>Se puede realizar en embarazos gemelares.</p> <p>*Es necesario traer la ecografía el día de toma de muestra entre la semana 12 y 13,6 de gestación</p> <p>*No requiere ayuno</p> <p>*Requiere formulario de ingreso diligenciado</p> <p>*Requiere consentimiento informado firmado</p>	<p>Medición de analitos placentarios (PAPP-A y PIGF) en Delfia Xpress.</p> <p>Sensibilidad: 90%</p>
Estabilidad	6 días refrigerado a 8°C. 30 días o más congelado					
Cantidad	2 cc					
Tubo	Tubo tapa roja o amarilla sin anticoagulante					
Observaciones	Tomar 5 cc de sangre periférica en tubo tapa roja o amarilla sin anticoagulante, dejar reposar la sangre 10 minutos a temperatura ambiente y centrifugar 3500 rpm por 15 minutos. Congele hasta realizar el envío.					