

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS

NipTest

TAMIZAJE PRENATAL NO INVASIVO DE ADN FETAL EN SANGRE MATERNA
 ANEUPLOIDÍAS CROMOSOMAS 13, 18, 21 y SEXUALES

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Sangre periférica		Lunes a Sábado	Diario	6 - 10 días Calendario	Se realiza a partir de la semana 10 de gestación. Se realiza en embarazos gemelares (especificar en formulario si es monocorial o bicorial) *No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	Sistema Robotizado 100%, Selección de fracción fetal y NGS Sensibilidad 99%
Estabilidad	10 días en tubo BCT a Temperatura ambiente					
Cantidad	1 Tubo BCT (10mL)					
Tubo	Solicitar el kit Genetix					
Observaciones	Inmediatamente se toma la muestra, mezclar 10 veces por inversión suavemente, para evitar hemólisis.					