

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS

TAMIZAJE PRENATAL NO INVASIVO DE ADN FETAL EN SANGRE MATERNA



ANEUPLOIDÍAS 46 CROMOSOMAS

ANALISIS DE 46 CROMOSOMAS + CNVs+ 5 microdeleciones

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Sangre periférica		Lunes a Sábado	Diario	6 - 10 días Calendario	<p>Se realiza a partir de la semana 10 de gestación.</p> <p>NipTest 46: Se realiza en embarazos únicos y gemelares SOLO Monocoriales.</p> <p>NipTest Plus: Se realiza SOLO en embarazos únicos.</p> <p>*No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado</p>	<p>Sistema Robotizado 100%, Selección de fracción fetal y NGS</p> <p>Sensibilidad 99%</p>
Estabilidad	10 días en tubo BCT a Temperatura ambiente					
Cantidad	1 Tubo BCT (10mL)					
Tubo	Solicitar el kit Genetix					
Observaciones	Inmediatamente se toma la muestra, mezclar 10 veces por inversión suavemente, para evitar hemólisis.					